

CLEARsplint®

*MMA-freie
Interimsversorgung*



für ein perfektes Lächeln

astron®



Vorteile von CLEARsplint®:

- ↻ absolut präzise Anpassung
- ↻ selbstadjustierend
- ↻ hohe Verträglichkeit, da frei von Methylmethacrylat (MMA)
- ↻ hoher und spannungsfreier Tragekomfort, kein Druckgefühl im Mund
- ↻ vergilbt nicht, da frei von Aminen
- ↻ unterfütterbar und reparabel

Wichtige Pflegehinweise:

Um eine Bruchgefahr Ihrer Aufbisschiene oder Teilprothese zu vermeiden, ist es zwingend erforderlich, diese vor jedem Tragen für mindestens 20 Sek. in ca. 50 °C warmes Wasser zu legen!

Bitte keine alkoholhaltigen Reiniger oder handelsüblichen Prothesenreiniger verwenden!
Wir empfehlen **astron DuraClean²™**

Spezialreiniger für CLEARsplint® Aufbisschiene und Interimsprothesen



DuraClean²

Sparsam im Gebrauch – reicht für 48 Anwendungen
Reiniger (170 g) mit Behälter und Bürste REF 261705
Reinigungsmittel - Dose mit 170 g REF 26171
Reinigungsbürste REF 26172
Reinigungsbehälter REF 26173

EC REP

KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 90 73-0
Fax: +49 (7961) - 5 20 31
info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de



Astron Dental Corp.
Lake Zurich, Ill. 60047
Made in USA

CLEARsplint®

*MMA-freie Premium
Aufbisschiene*



Der perfekte Schutz!

astron®

M260396/17.12.2020

astron[®] CLEARsplint[®]



Eine verformte CLEARsplint[®] Komfort-Aufbisschiene passt sich dank der thermoaktiven Eigenschaft des Kunststoffes und dessen exzellenter Flexibilität einfach und präzise wieder an die Zähne an. Die gute Oberflächenhärte geht auch unter Wärme nicht verloren.



Qualität und Ästhetik aus Meisterhand - überreicht von:



Situationsmodell



...mit passgenauem Aufbisschutz



Vorteile, die für sich sprechen! astron CLEARsplint[®] als Schiene:

- ☉ die thermoaktive Flexibilität der Schiene ermöglicht eine präzise Anpassung
- ☉ ist selbstadjustierend im Mund, wenn sie vor Gebrauch zur Flexibilisierung in warmes Wasser (40-50 °C) gelegt wird
- ☉ hohe Verträglichkeit – **Methylmethacrylat (MMA)-frei**
- ☉ bessere Anpassung ermöglicht höheren und spannungsfreien Tragekomfort – lange tragefähig
- ☉ durchsichtige und optische Klarheit erlaubt nahezu unbemerktes Tragen
- ☉ Reparaturen und Ausbesserungen können durchgeführt werden
- ☉ einfache Hygiene, zur täglichen Reinigung leicht herausnehmbar
- ☉ hohe Bruchstabilität – optimaler Schutz der Zähne

wichtige Patienteninformation auf der Rückseite --->

Vorteile, die für sich sprechen! astron CLEARsplint[®] als Zahnersatz:

- ☉ Ästhetischer Zahnersatz ohne Metallklammern
- ☉ Sichtbarkeit des natürlichen Zahnfleisches
- ☉ durchsichtige und optische Klarheit erlaubt nahezu unbemerktes Tragen
- ☉ die thermoaktive Flexibilität der Interims-Prothese ermöglicht eine präzise Anpassung - hervorragende Klemmwirkung und leichtes Ausgliedern
- ☉ ist selbstadjustierend im Mund, wenn sie vor Gebrauch zur Flexibilisierung in warmes Wasser (40-50 °C) gelegt wird
- ☉ hohe Verträglichkeit – **Methylmethacrylat (MMA)-frei**
- ☉ Reparaturen und Erweiterungen können durchgeführt werden
- ☉ einfache Hygiene, zur täglichen Reinigung leicht herausnehmbar
- ☉ hohe Bruchstabilität

wichtige Patienteninformation auf der Rückseite --->